



認知機能測定&訓練 ペグ・アモーレ

WiFi 機能追加 



指先を使って脳に刺激

脳のトレーニングが楽しく簡単にゲーム感覚で
複数の脳部を同時に使って
毎日継続的なトレーニングを実現!




- 筑波大学大蔵倫博教授と共同開発
- 精神的な負担が掛からない
- 毎日2分から出来る脳のトレーニング習慣
- 脳のコンディションを引き上げる

主な特徴

- ・2分間で簡単スピード測定
(従来の多くは10分程度かかっていました)
- ・ひとりで簡単測定、訓練
(従来の多くは面談形式で行う検査でした)
- ・高齢者1000人のデータに基づいて
5段階評価の★の数で表示します。
- ・過去の経緯が把握できるので、
訓練を楽しく継続的にやる事が出来ます。
- ・元気なうちからあたまの健康管理に取り組みます。
- ・誰でも気軽にでき、精神的な負担がかかりません。
- ・多数の訓練モードがあります。



ペグ・アモレをパソコンに接続することにより
個人別、モード別にペグ・アモレ結果 履歴の表示/印刷
を行う事が出来ます。(USB又はWiFiで接続できます。)

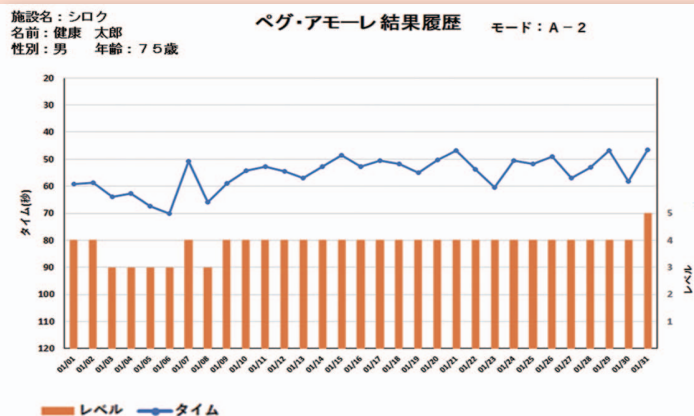

訓練モード表

各モードの1は練習用、2はフルサイズの配置ランダム型、
3はフルサイズの配置固定型。(但し、C及びPモードは除く)

モードA: 数字による標準モード (1、2、3と順番にペグを移動)

A-1: 3×3、ランダム

A-2: 5×5、ランダム

A-3: 5×5、固定配置(トレイルメイキングテスト Part-Aに似たもの)

モードB: 数字・平仮名混在の標準モード (1、あ、2、い、3という順番)

B-1: 3×3、ランダム

B-2: 5×5、ランダム

B-3: 5×5、固定配置(トレイルメイキングテスト Part-Bに似たもの)

モードC: 数字による集中力持続モード (ペグを入れて、抜いてを繰り返す)

C-1: 3×3、全ステージランダム

C-2: 5×5、全ステージランダム

C-3: 5×5、2ステージごとにランダム再配置

モードF: フランカーモード (横に並ぶ記号のうち異なる記号を見つけ出す)

F-1: 3×3、全ステージランダム

F-2: 5×5、全ステージランダム

F-3: 5×5、固定配置(テスト用の規則的な物)

モードM: 記憶モード (最初のパターンを覚えて、別の作業後に思い出す)

M-1: 3×3、表示10秒、ゲーム20秒、回答20秒、ランダム3箇所

M-2: 5×5、表示10秒、ゲーム30秒、回答20秒、ランダム5箇所

M-3: 5×5、表示10秒、ゲーム30秒、回答20秒、固定配置5箇所

モードP: ペグ棒固定順挿入モード (リハビリ向けモード)

P-1: ペグ棒25本を左→右に昇順に挿入

P-2: ペグ棒25本を左側から上→下に昇順に挿入

P-3: ペグ棒25本を右→左に昇順に挿入

P-4: ペグ棒25本を右側から上→下に昇順に挿入

モードV: 動体視力モード (モグラたたきのように、光る箇所を追う)

V-1: 3×3、ランダム

V-2: 5×5、ランダム

V-3: 5×5、固定配置(テスト用の規則的な物)



WiFi機能付き PEG-A02G ￥288,000(税別)

レンタルもあります(貸出期間 基本1ヶ月から)

■内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。 ■本誌の一部または全部を無断で複写複製(コピー)することは著作権法で禁じられています。

販売元

フィンガルリンク株式会社

〒111-0041

東京都台東区元浅草二丁目6番6号東京日産台東ビル5F

☎ 03-6802-7145(代表)

FAX : 03-6802-7156

E-mail : info@finggal-link.com

